

TRANSCEND³ minicpapTM

製品仕様

モード	オートCPAP、固定CPAP	電源	AC100V~240V 50/60Hz (AC電源サプライ:入力) DC18V 1.67Amp (AC電源サプライ:出力)
圧力設定範囲	4~20cmH ₂ O (±1cmH ₂ Oまたは±10%の何れか大きい方)	電気安全性	EN60601-01 クラスII/BF形装着部
EZEX機能	OFF、1~3 (3段階で設定)	温度条件	使用時: 5~35℃ 輸送及び保管時: -20~+60℃
最大システム停止圧	30cmH ₂ O	湿度条件	使用時: 10~80% (相対湿度、結露なし) 輸送及び保管時: 10~90% (相対湿度、結露なし)
ランプ時間	0~45分 ±25% (変動値)	作動高度	0~2438m (0~8000ft)
データ記録量	最低90日または40,000イベント (上記日数は高AHI、毎晩8時間使用の場合)	寸法/重量	190 (D) × 95 (W) × 94 (H) mm / 494g
		承認番号	302ALB2X00019000

品名	P/N	価格
トランセンド3	503104	¥168,000
[オプション/交換部品]		
トランセンド3 フィルタアセンブリ	503109	¥1,500
トランセンド P8 バッテリ	503023	¥44,000
トランセンド キャリングケース	503012	¥8,800
トランセンド AC電源アダプタ (PSA2)	503059	¥9,000
トランセンド 海外用プラグパック	503060	¥1,500
トランセンド AC電源アダプタ・プラグセット	503078	¥12,000
トランセンド USBケーブル	503020	¥2,000

構成

- トランセンド3 本体
- 22mm呼吸回路チューブ (180cm)
- AC電源アダプタ
- 海外用プラグ
- キャリングケース
- USBケーブル
- クイックガイド
- 取扱説明書
- 添付文書



Sleep well every night, everywhere.
All new. Smarter at home and on the go.



Freedom to sleep anywhere

製造元

Somnetics

総販売元



株式会社 MAGnet

〒162-0053 東京都新宿区原町3丁目19 ラーズビル
TEL: 03-5291-7188 FAX: 03-3202-5789
<http://www.magnet-japan.com/>

Somnetics

Transcend 3 mini CPAP

トラベルCPAPのパイオニア、“Transcend mini CPAP”。
『トランセンド3』は、小型軽量という特徴はそのままに
安定性が高くモダンなデザインへと生まれ変わりました。

お出かけ先でも継続して
快適なCPAP療法を実現！

- 世界最小級・軽量のCPAP (494g)。
- 衝撃にも耐えるデザイン
- 日本のエアベアリング技術採用、発熱・振動・作動音を大幅に軽減。
- バッテリー駆動が可能(オプション)。
- FAA(アメリカ連邦航空局) 認証済

▶ 小型・軽量

ジュース缶ほどのサイズ、重量は494g。
スーツケースやバックパックの中でも場所をとりません。
FAA認証済、飛行機内でもご使用頂けます。*

*利用できない場合もあります。航空会社までお問い合わせください。



▶ 耐久性の高いデザイン

持ち運びやアウトドアでの衝撃にも耐えるデザイン*で
トランセンド3はアクティブなライフスタイルをサポートします。

*UL certification: Section 15.3 Mechanical Strength

▶ Functions 搭載機能

小型でありながらもCPAPの基本機能が備わっています。


- 固定モード/オートモード
- EZEX (呼気時の圧リリース機能)
- ランプ機能

▶ EZEX イージーエックス: 呼気中の圧リリース機能

『EZEX』はTranscend CPAPに搭載された
圧リリース機能です。


吸気から呼気に切り替わる際に供給圧を
下げることでCPAP圧が高い場合でも息を
はきやすくし、吸気開始までに徐々に供給
圧を上げます。

3段階での設定が可能で、快適な圧リリー
フレベルを調整することができます。

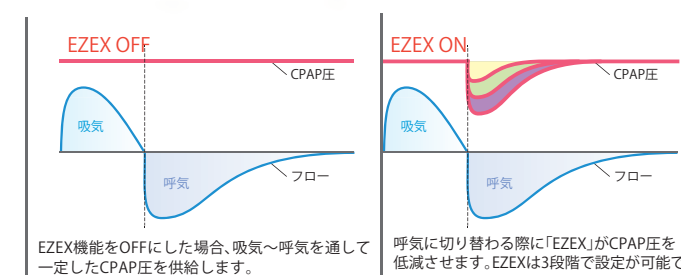

▶ Data Management コンプライアンスデータ管理

トランセンド3は、本体に最大13ヶ月分のCPAP使用中のコンプライアンスデータを蓄積します。

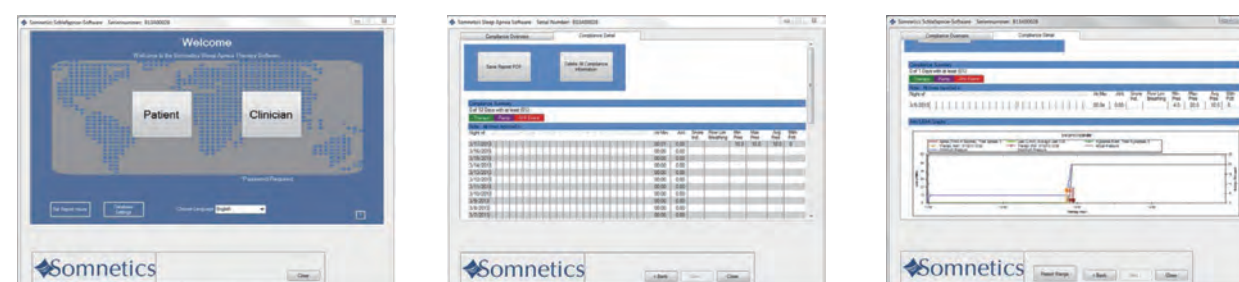

▶ Battery Option バッテリーオプション

オプションのP8バッテリーを使用すれば
出張や旅行先、アウトドアなど電源の取れない
場所であってもCPAP治療の継続が可能。
場所を問わず快適な眠りをサポートします。

※P8バッテリーは約2晩分の電力供給が可能です。

